

Tiene movimientos peristálticos entre las irrigaciones o no se siente limpio

Intente realizar la irrigación con **más frecuencia** o repita la irrigación.

¿Es mejor colocar el contenedor de agua en una posición elevada?

No es más efectivo colocar el contenedor de agua en una posición elevada. Es preferible colocarlo en el suelo.

Sujeción de la sonda con punta cónica

Puede sujetarla por **la base del cono** o por el mango de la sonda.

La sonda de punta cónica es de un solo uso

Es de un solo uso debido a su recubrimiento hidrofílico. Además, esto garantiza una higiene óptima y fácil inserción.

Si incluyo alguna sustancia en el agua, por ejemplo sal, manzanilla, aceite de oliva, etc. ¿obtendré alguna ventaja?

No supone ninguna ventaja.

Laxantes/astringentes

Si está tomando laxantes/astringentes antes de empezar el proceso de irrigación, es aconsejable que **continúe haciéndolo**.

Caducidad de los componentes de Peristeen Plus

Las sondas lubricadas (con balón o con punta cónica) **son de un sólo uso**.

El contenedor de agua debe **sustituirse cada 15 irrigaciones**.

La tapa del contenedor de agua y la unidad de control deben **sustituirse cada 90 irrigaciones**.

¿Dónde puedo resolver todas mis dudas sobre Peristeen® Plus?

Su profesional sanitario es el experto en salud intestinal. Si bien entre las citas que tenga programadas siempre puede contar con **Coloplast® Care**. Un programa de apoyo gratuito, diseñado específicamente para **ayudarle a recuperar la confianza** y garantizar que aprovecha al máximo las soluciones de tratamiento que le han sido prescritas.

Para más información visite www.coloplastcare.es

¿Cómo utilizar *Peristeen® Plus*?



Escanee con la cámara de su móvil estos códigos:



Sonda cónica



Sonda con balón

¿Dónde puedo resolver todas mis dudas?

Programa de apoyo gratuito

900 210 474

www.coloplastcare.es



Antes de usar el producto,
consulte siempre las
Instrucciones de Uso

Ostomy Care | Continence Care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Respiratory Care

Coloplast Productos Médicos, S.A., Condesa de Venadito, 5, 4ª - 28027 Madrid, España
www.coloplast.es Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. © 2024/08
Todos los derechos reservados por Coloplast A/S. | 460NDD2492 - PM-36470



Preguntas más frecuentes

Peristeen® Plus

En este documento se ha tratado de incluir las preguntas más frecuentes acerca de Peristeen® Plus. Si tiene alguna duda o requiere más información puede contactar con Coloplast Care.

Peristeen® Plus es un sistema de irrigación transanal, fácil de usar, para el manejo de la disfunción intestinal. En el inicio del tratamiento es muy importante planificar un período de adaptación de forma individualizada. Si cuando utilice Peristeen® Plus surge alguna de las siguientes situaciones, intente adaptar el tratamiento como se recomienda a continuación.

Pérdida de agua durante la irrigación

Intente inflar más el balón girando la rueda de la unidad de control hasta el **símbolo del balón (blanco)**  y bombee aire una vez más. Ahora tire suavemente de la sonda para sellar el recto. Gire la unidad de control hasta el **símbolo del agua (turquesa)**  y continúe con la irrigación.

Tiene retortijones cuando introduce agua en el recto

Intente bombear agua más despacio y/o haga una pausa durante un minuto y espere a que disminuyan los retortijones. Compruebe que el agua no está demasiado fría. El agua debe estar a la temperatura corporal.

Experimenta molestias, sudoración y/o mareos cuando el agua se introduce en el recto

Haga una pausa. Gire la rueda de la unidad de control hasta el **símbolo del balón (blanco)**  para detener el flujo de agua y espere hasta que las molestias cesen. Cuando esté preparado, gire la rueda de la unidad de control en sentido contrario hasta el **símbolo del agua (turquesa)**  y reanude el bombeo. Si las molestias son intensas y no cesan, **deberá avisar urgentemente a su profesional sanitario.**

Experimenta dolor intenso o continuo en el abdomen o en la espalda, con o sin fiebre, con sangrado anal continuo

Detenga inmediatamente la irrigación. Desinfele el balón y retire la sonda. Tenga en cuenta que puede tratarse

de una perforación intestinal. **Avisé urgentemente a su profesional sanitario.**

Aparecen manchas de sangre en la sonda

Si ocasionalmente observa puntos o manchas de sangre en la sonda no debe preocuparse ya que pueden ser debidas a hemorroides u otras afecciones anales. Sin embargo, si experimenta sangrado de forma repentina o continua, debe avisar urgentemente a su profesional sanitario. En cualquier caso, **siempre hay que buscar el origen del sangrado anal**, especialmente en los primeros meses de uso de Peristeen® Plus.

El balón explota

Si el balón se rompe dentro del intestino recuerde que **no producirá ningún daño**. Por razones de seguridad, el balón está diseñado para romperse a una cierta presión (el balón se romperá antes de dañar el intestino). Hay que considerar: si se ha lubricado la sonda en agua al menos durante 30 segundos; si el balón se ha inflado demasiado o puede haberse producido algún espasmo anal.

La sonda se sale inmediatamente después de inflar el balón

El balón puede estimular el recto produciendo una contracción. **Intente inflar el balón más despacio o con menos aire.**

La sonda es expulsada cuando se bombea agua en el recto

Compruebe que el agua no está demasiado fría. La irrigación debe realizarse **con agua potable tibia (34-40°C)**. Intente bombear agua más despacio.

La sonda es expulsada y el balón se desinfla

Compruebe que el balón no ha estallado. Asegúrese que la rueda de la unidad de control no se encuentra en el **símbolo de desinflado (gris)**  en lugar de en el **símbolo del agua (turquesa)** .

La sonda no entra con facilidad en el ano

Compruebe si se produce un espasmo anal mientras introduce la sonda. Compruebe si hay impactación fecal.

Puede ser necesaria la evacuación del primer tramo del recto mediante supositorios o estimulación digital. Incluso puede ser necesaria la irrigación del primer tramo del recto. También puede intentar ajustar la dirección de la sonda, una vez que haya insertado la punta, moviéndola ligeramente hacia atrás. No fuerce la introducción de la sonda.

Dificultad para irrigar agua en el recto

Compruebe que las **heces del recto no bloquean el flujo del agua**. Tenga en cuenta que la presencia de heces en el primer tramo del recto indica que debería realizar la irrigación con más frecuencia o ajustar el procedimiento. Se recomienda limpiar el primer tramo del recto (p.e. mediante estimulación digital con guantes). **No es necesario utilizar lubricante.**

El agua de la irrigación no se evacúa

Intente presionar, toser, masajear su abdomen o incorporarse. Si aún así el agua no sale, es probable que esté estreñido y necesite limpiar su intestino previamente. También puede que esté deshidratado, por lo que debería beber más líquido y repetir la irrigación al día siguiente.

Después de retirar la sonda las heces no pasan por el recto

Puede estar muy estreñido por lo que debería realizar una limpieza del recto antes de repetir la irrigación. Quizá necesite un laxante. Si hasta el momento la irrigación ha tenido buenos resultados, puede que no haya heces y la frecuencia de la irrigación se podrá reducir.

Se producen fugas después de la irrigación

En la medida de lo posible, incorpórese, muévase y esté atento ante posibles fugas; 30 a 60 minutos después de la irrigación vuelva al aseo y observe si hay fugas. Puede ayudarle la estimulación digital después del vaciado. Si continúa teniendo fugas **consulte con su profesional sanitario** para ajustar el volumen de agua o número de irrigaciones.