
















Herramienta de evaluación del perfil de la zona periestomal

Define el perfil de la zona periestomal de tu paciente para identificar la solución de ostomía más adecuada.

Nombre del paciente	Fecha	Nombre del personal de enfermería	
1	La forma del área periestomal La forma puede cambiar al sentarse, acostarse o moverse.	Normal	La zona está más o menos nivelada con el abdomen, aunque la superficie de la piel puede ser irregular.
		Invaginada	El estoma se hunde en el abdomen creando un hueco.
		Eventrada	El estoma sobresale del abdomen creando un pico.
	Normal	Invaginada	Eventrada o protruida
			
2	La forma que se ha seleccionado es uniforme o desigual	Uniforme	La forma es uniforme en la zona del estoma.
		Desigual	La forma no es uniforme en la zona del estoma.
	Normal Uniforme	Invaginada Uniforme	Eventrada Uniforme
			
	Desigual	Desigual	Desigual
			
3	Abdomen blando o rígido	Blando	La zona cede a la presión (como cuando se presiona un colchón de agua).
		Rígido	La zona resiste la presión (como cuando se presiona el balón).
	Abdomen blando	Abdomen rígido	
			
4	Pliegues superficiales o profundos	Superficiales	La piel tiene líneas, surcos o arrugas.
		Profundos	La zona tiene pliegues profundos de piel suelta o exceso de grasa.
	Pliegues superficiales	Pliegues profundos	
			

5	Ubicación del estoma	Por encima de la línea de flexión abdominal	El estoma está situado cerca de las costillas.
		En la línea de flexión abdominal	El estoma está situado en los pliegues del abdomen.
		Por debajo de la línea de flexión abdominal	El estoma está situado por debajo de la línea de flexión abdominal.
	Por encima de la línea de flexión abdominal	En la línea de flexión abdominal	Por debajo de la línea de flexión abdominal
			

6	Ubicación de la apertura del estoma	Por encima de la superficie de la piel	El estoma sobresale de la superficie de la piel.
		Al nivel de la superficie de la piel	Es estoma está a nivel de la superficie de la piel.
		Por debajo de la superficie de la piel	El estoma se sitúa por debajo de la superficie de la piel.
	Apertura del estoma por encima de la superficie de la piel	Apertura del estoma al nivel de la superficie de la piel	Apertura del estoma por debajo de la superficie de la piel
			

7	Tipo de efluente	Heces espesas	
		Heces líquidas	
		Orina	

Solución de ostomía recomendada

Forma del adhesivo*	Dispositivo	Tipo de bolsa
Plano	1 pieza.	Abierta
Convexo blando	2 piezas (acople adhesivo).	Cerrada
Convexo ligero	3 piezas (acople mecánico).	Válvula de vaciado
Convexo profundo		
Otro		

Productos de apoyo**

*Consulta «Tu guía de soluciones de ostomía en función de las necesidades individuales».

**Por favor, consulta la rueda de soluciones Brava.

Para más información, ponte en contacto con tu delegado de ventas de Coloplast, o con Coloplast Directo.