

Colocación correcta del dispositivo

POR EL PROFESIONAL



POR EL PACIENTE



- Una vez ajustado el disco alrededor del estoma, doblar la bolsa para visualizar bien el borde del aro flotante. Hacer coincidir la parte inferior del aro flotante del disco con la parte inferior del aro de la bolsa.
- Dejar caer la bolsa hacia el disco desde abajo hacia arriba, sin estirar ni aplicar ninguna fuerza.
- Por último, presionar ligeramente con los dedos el aro para asegurar la fijación.

RETIRADA DEL DISPOSITIVO



- Sujetar con una mano el aro flotante del disco, mientras con la otra tiramos poco a poco de la pestaña del aro de la bolsa.
- Terminar de despegar la bolsa sin dejar de sujetar el aro del disco.

LO QUE NO SE DEBE HACER



No doblar excesivamente el aro de la bolsa para que no queden pliegues en el mismo.



No colocar las bolsas directamente sobre la piel. Utilizar siempre un disco Easiflex® protegiendo la piel periestomal.

Easiflex® Comfort
Discos reembolsados
por el S.N.S.



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Todos los derechos reservados por Coloplast Productos Médicos, S. A.
Condesa de Venadito 5, 4ª planta - 28027 Madrid, España.
www.coloplast.es Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. © 2020/06 46N0T2094

 **Coloplast**