

Algoritmo de productos Coloplast



		OBJETIVO	NIVEL EXUDADO	PROFUNDIDAD	TRATAMIENTO PREFERENTE	TRATAMIENTO ALTERNATIVO
INDICACIONES SEGÚN TIPO DE TEJIDO	HERIDA AGUDA SUPERFICIAL	① Proteger	👉👉👉	No profunda	Biatain®Silicone Non-Border Biatain®Contact 1º + Biatain®Non-Adhesive 2º	Comfeel® Plus Transparent
	Heridas crónicas: • UPP • Úlcera de pie diabético • Úlceras vasculares	① Hidratar ② Desbridamiento autolítico	👉👉👉	Superficial	Purilon® 1º + 2º Pieles normales o frágiles Biatain®Silicone Pieles extra frágiles Biatain®Silicone Non-Border	Purilon® 1º + 2º Comfeel® Plus Transparent
		① Desbridamiento autolítico ② Rellenar los espacios muertos ③ Gestión del exudado	👉👉👉	- de 2cm*	Pieles normales o frágiles Biatain®Silicone Pieles extra frágiles Biatain®Silicone Non-Border	Pieles extra frágiles Biatain® Pieles normales o frágiles Biatain®
		① Gestión del exudado ② Proteger el tejido de granulación	👉👉👉	+ de 2cm	Biatain®Fiber 1º + 2º Pieles normales o frágiles Biatain®Silicone Pieles extra frágiles Biatain®Silicone Non-Border	Biatain®Alginate 1º + 2º Pieles normales o frágiles Biatain® Pieles extra frágiles Biatain®
		① Protección del tejido recién formado ② Mantener las condiciones óptimas de temperatura y humedad	👉👉👉	- de 2cm*	Biatain®Silicone Lite Comfeel® Plus Transparent	Comfeel® Plus
PRESENCIA DE SIGNOS DE INFECCIÓN		① Manejar la carga bacteriana ② Rellenar los espacios muertos ③ Gestión del exudado	👉👉👉	- de 2cm*	Biatain®Silicone Ag	Pieles extra frágiles Biatain®Ag Pieles normales o frágiles Biatain®Ag
			👉👉👉	+ de 2cm	Biatain®Alginate Ag 1º + 2º Biatain®Silicone Ag	Biatain®Alginate Ag 1º + 2º Biatain®Ag

Para más información sobre cómo valorar una herida con el Triángulo de Evaluación de Heridas



1º Apósito primario 2º Apósito secundario

*Los apósitos de Coloplast con Tecnología 3DFit se conforman al lecho de la herida hasta 2cm de profundidad; por tanto, no es necesario el uso de apósitos de relleno en estas heridas (exceptuando el caso de heridas tunelizadas y cavitadas)

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care
Coloplast Productos Médicos, S.A. Condesa de Venadito, 5, 4ª Planta - 28027 Madrid, España
www.coloplast.es. Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. © PM-18977 Ref. 460N0D6796
Conoce nuestro blog www.menosdiasconheridas.com

Productos de Cuidado de Heridas Coloplast



Apósitos dispensables con prescripción en Andalucía



**Biatain[®] Silicone**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
546379	492959	12,5x12,5 cm
546378	492934	15x15 cm
546387	492942	17,5x17,5 cm

Apósito de espuma poliuretano c/silicona c/capa alveolar c/b. 3 uds.
Palabra Clave: espacio
CAPA ALVEOLAR



Conformabilidad

Absorción vertical

Gran capacidad de retención

**Biatain[®] Silicone Sacro**

Nuevo

Biatain[®] Silicone Non-Border

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
546271	488932	12,5x12,5 cm
546272	488940	15x15 cm

Aposito de espuma poliuretano c/silicona c/capa alveolar c/b. 3 uds.
Palabra Clave: espacio
CAPA ALVEOLAR

Retiene el exudado bajo compresión

**Biatain[®] Silicone Multishape**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño	Palabra Clave: espacio
546505	467159	14x19,5 cm	CAPA ALVEOLAR MULTIFORMA

**Espumas de silicona con Ag****Biatain[®] Silicone Ag**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño	Palabra Clave: espacio
546502	488957	12,5x12,5 cm	CAPA ALVEOLAR PLATA
546350	497842	15x15 cm	

Único apósito con Complejo Zirconio Plata y Tecnología 3DFit.

**Fibras de alginato****Biatain[®] Alginate**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
546195	480681	10x10 cm

Apósito de alginato c/ hidrocoloide. 3 uds.
Palabra Clave: espacio
ALGINATO C/ HIDROCOLOIDE

Fibras de alginato con Ag**Biatain[®] Alginate Ag**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
546321	480699	15x15 cm

Apósito de hidrofibra c/ alginato c/ cmc c/ plata 15x15 (cm). 3 uds.
Palabra Clave: espacio
ALGINATO CMC PLATA

Fibras de hidrocoloide**Biatain[®] Fiber**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño	Palabra Clave: espacio
546508	482182	15x15 cm	CELDA HEXAGONAL



Atrapa el exudado y las bacterias



Mínima retracción del apósito



Gelificación altamente cohesiva

**Biatain[®] Contact**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
546521	493502	15x15 cm

Apósito malla c/silicona 15x15 (cm). 3 uds.
Palabra Clave: espacio
MALLA SILICONA 15x15

Poros más grandes

Mayor transparencia

Adherencia en una sola cara

**Comfeel[®] Plus Transparent**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
546147	476697	10x10 cm
546148	467597	15x15 cm
546204	476705	5x25 cm

Apósito de hidrocoloide transparente. 3 uds.
Palabra Clave: espacio
TRANSPARENTE

**Espumas con adhesivo de hidrocoloide****Biatain[®] Adhesive**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
546265	486852	12,5x12,5 cm
546266	486860	15x15 cm

12,5x12,5 - Apósito de espuma poliuretano c/b cmc 10x10 (cm) s/a 8x8 (cm). 3 uds.
15x15 - Apósito de espuma poliuretano c/b cmc 15x15 (cm) s/a 10x10 (cm). 3 uds.
Palabra Clave: espacio
CMC S/A

**Biatain[®] Adhesive Light**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
546027	488965	12,5x12,5 cm

Apósito de espuma poliuretano extrafino c/b 10x10 (cm). 3 uds.
Palabra Clave: espacio
EXTRAFINO C/B

**Biatain[®] Adhesive Sacro**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
546268	488973	17x17 cm

Apósito de espuma poliuretano c/b cmc sacro 17x17. 3 uds.
Palabra Clave: espacio
CMC SACRO

**Biatain[®] Adhesive Talón**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
546310	489187	19x20 cm

Apósito de espuma poliuretano c/b cmc talón. 3 uds.
Palabra Clave: espacio
CMC TALÓN

**Biatain[®] Adhesive Contour**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
54626	496703	17x17 cm

Apósito espuma poliuretano c/b cmc disco. 3 uds.
Palabra Clave: espacio
CMC DISCO

Otros productos**Purilon[®]**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
545945	485649	25 gr

Apósito de hidrogel 25 g
Palabra Clave: espacio
HIDROGEL 25



Antimicrobiano



Se puede recortar



Indicado para piel frágil



Permite el aseo

**Espumas sin adhesivo de hidrocoloide****Biatain[®] Non-Adhesive**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
546028	489245	10x20 cm

Apósito de espuma poliuretano extrafino 10x20 (cm). 3 uds.
Palabra Clave: espacio
EXTRAFINO 10X20

**Biatain[®] Soft-Hold**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
546006	400128	10x10 cm
546152	400129	10x20 cm
546153	400130	15x15 cm

Apósito de espuma de poliuretano c/ parafina. 3 uds.
Palabra Clave: espacio
PARAFINA

**Otras espumas con Ag****Biatain[®] Ag Non-Adhesive**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
545940	496729	10x10 cm
546149	496737	15x15 cm

Apósito de espuma poliuretano c/ plata. 3 uds.
Palabra Clave: espacio
ESPUMA PLATA

**Biatain[®] Ag Adhesive Sacro**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
546291	400121	17x17 cm

Apósito de espuma poliuretano c/ plata c/b cmc sacro. 3 uds.
Palabra Clave: espacio
PLATA CMC SACRO

**Biatain[®] Ag Adhesive Talón**

C. DIRAYA	C.N.	Tamaño
546292	400122	19x20 cm

Apósito de espuma poliuretano c/ plata c/b cmc talon. 3 uds.
Palabra Clave: espacio
PLATA CMC TALÓN